

PROVOX[®] HME Compact

POUR NON PORTEURS D'IMPLANT PHONATOIRE


Les cassettes Provox HME Compact sont des Echangeurs de Chaleur et d'Humidité (ECH) destinés aux patients NON porteurs d'implant phonatoire n'ayant pas besoin d'obturer leur trachéostome pour parler (sans valve phonatoire à obturation digitale).

Caractéristiques

- Échangeur de chaleur et d'humidité (HME)
- Fenêtres latérales permettant la respiration et offrant une sécurité de fonctionnement même lorsque la cassette est recouverte par un vêtement.

De ce fait :

- Les cassettes HME Compact peuvent être dissimulées sous les vêtements.
- Les cassettes HME Compact protègent les vêtements des tâches d'humidité.

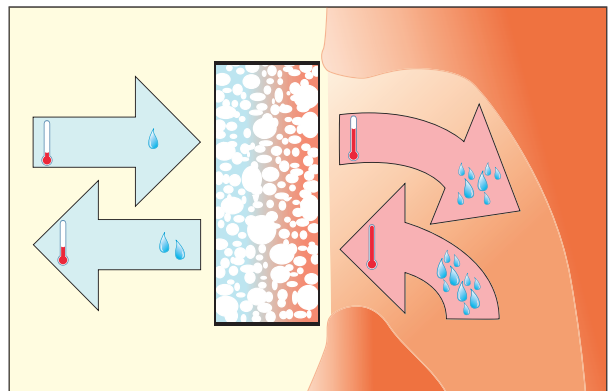

L'E.C.H. fonctionne comme un condensateur et contribue à protéger les voies respiratoires.

L'échangeur de chaleur et d'humidité réchauffe et humidifie l'air inspiré et contribue à restaurer la résistance pulmonaire. Il retient dans les voies aériennes environ 60 % de l'humidité qui, en son absence, serait perdue par la respiration à travers un trachéostome ouvert. Son utilisation est associée à une réduction des problèmes de toux et de production de mucus. Le résultat est une amélioration du

sommeil et de la qualité de vie. La cassette Provox HME Compact repose sur un mécanisme simple, documenté comme sans danger et parfaitement hygiénique.

Les Provox HME Compact sont disponibles en deux versions :

- Normal, pour un usage quotidien.
- HiFlow, pour une résistance réduite à l'écoulement de l'air, par exemple en cas d'activité physique ou durant l'adaptation à un premier ECH

Les cassettes Provox HME Compact s'adaptent aussi bien aux adhésifs Provox qu'aux calibreurs Provox LaryTubes. Il est recommandé d'utiliser la version HiFlow avec un LaryTube.

Informations pour la commande	Quantité	RÉF.
Compact cassette Normal	20 unités	7236
Provox HME Compact cassette HiFlow	20 unités	7237
Provox HME Compact Starter Kit (kit de démarrage) 5 de chacun des Provox Adhesive (7251-7256 et 7265) 20 Provox HME Compact Cassettes, Normal (7236) et 30 unités HiFlow (7237) 20 unités de Remove (59403125) 1 Provox ShowerAid (7260)	1 unité	7238
Non stérile, à usage unique (24 heures maxi.).		

Let's
talk about
life[®]



Manufactured by:
Atos Medical AB
P.O. Box 183, SE-242 22 Hörby, Sweden
Tel: +46 (0)415 198 00 • Fax: +46 (0)415 198 98
info@atosmedical.com • www.atosmedical.com




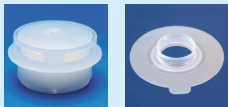


19, rue de la Gare
FR-94230 CACHAN
Tel: +33 (01) 49 08 08 88 • Fax: +33 (01) 49 08 08 89
E-mail: info@collin-oral-cmf.com • www.collin-oral.com



Arbre décisionnel du système modulaire Provox HME

Laryngectomie totale

	Avec implant phonatoire :		Sans implant phonatoire :	
Durant l'hospitalisation	Provox HME + LaryTube, ou, si support calibreur non nécessaire : 	Provox HME + autoadhésif OptiDerm 	Provox HME Compact + LaryTube, ou, si support calibreur non nécessaire : 	Provox HME + autoadhésif OptiDerm 
A la sortie de l'hôpital : phase de sélection (recherche du système modulaire le plus adapté à chaque patient) et à distance de l'intervention	Kit de démarrage Provox HME (sans valve digitale) pour choisir : Cassette adaptée : Normale HiFlow Support auto-adhésif adapté Regular rond/ovale FlexiDerm rond/ovale OptiDerm rond/ovale Cas particuliers : XtraBase ou LaryTube		Kit de démarrage Provox HME Compact (avec valve digitale) pour choisir : Cassette adaptée : Normale HiFlow Support auto-adhésif adapté Regular rond/ovale FlexiDerm rond/ovale OptiDerm rond/ovale Cas particuliers : XtraBase ou LaryTube	
Si VTO réussie et bonne capacité respiratoire	Provox FreeHands HME valve automatique « main libre » choix de support auto-adhésif plus adapté incluant XtraBase , ou LaryTube à bague (with ring) avec auto-adhésif adapté		Non adapté	
Utilisation quotidienne hors hospitalisation (modules et ou accessoires)	Occlusion manuelle	Valve automatique « main libre »	Occlusion de trachéostomie pas nécessaire	
	Continuer avec l'auto-adhésif et les cassettes Provox HME choisies	Continuer avec l'auto-adhésif choisi FreeHands Cassette	Continuer avec l'auto-adhésif et les cassettes Provox HME choisies	
		Accessoires FreeHands	Cassettes HME choisies	

Pour plus d'informations, demandez votre catalogue Provox gratuit.

COLLIN ORL

19, rue de la Gare
FR-94230 CACHAN

Tel: +33 (01) 49 08 08 88 • Fax: +33 (01) 49 08 08 89

E-mail: info@collin-ork-cmf.com • www.collin-ork.com

Brevets et marques commerciales :

Provox®, Provox ActiValve®, Provox® FreeHands HME®, Provox® StomVent®, Provox® XtraBase® et Let's talk about life® sont des marques déposées d'Atos Medical AB, Suède. Provox® HME Cap®, Provox LaryTube® et Provox® NID™ sont des marques d'Atos Medical AB, Suède.

Remove® et Skin-Prep® sont des marques de Smith & Nephew Inc., U.S.A. Provox®, Provox®2, Provox ActiValve®, Provox® HME, Provox® FreeHands HME®, Provox® HME Cap®, Provox® XtraBase®, Provox® StomVent® et Provox® NID™ sont protégés par des brevets américains (5.314.470 ; 5.976.151 ; 5.738.095 ; 4.909.502 et 5.035.420) et d'autres brevets accordés ou en instance.



7850 200603