

SOMNOFIT®

Orthèse d'avancée mandibulaire

Je souhaite commander l'orthèse SOMNOFIT :

Nom :

Adresse :

Tél : Fax :

Mail :

Médecin prescripteur :

Tampon du médecin :

Pour recevoir mon orthèse, je complète ce bon de commande et je joins un chèque à l'ordre de Collin de 99 € (Prix TTC, frais de port inclus).

J'opte pour le règlement en 2 fois sans frais et je joins deux chèques de 49,50 € dont un sera encaissé à la commande et le second à 30 jours.

Renvoyer ce coupon et le règlement à :

COLLIN

Collin
3, rue de Robinson
92227 Bagneux Cedex

COLLIN

Z Z Z FROQP HGLFDU

Indications :

- ❖ Ronflement
- ❖ Apnées obstructives modérées ou sévères
- ❖ Hypopnées
- ❖ Traitement complémentaire à la PPC ou CPAP (Pression Positive Continue)
- ❖ Traitement de deuxième intention pour les déplacements de courte durée

Contre-indications relatives :

- ❖ Port d'une prothèse dentaire amovible
- ❖ Douleurs de l'articulation mandibulaire
- ❖ Déchaussement et instabilité de la dentition

Le set SOMNOFIT® contient :

- ❖ Deux gouttières thermoformables
- ❖ Un thermomètre à flotteur
- ❖ Une boîte de rangement ventilée
- ❖ Un set de 6 bandelettes de taille variant de 3 à 10,5 mm

SOMNOFIT® a pour référence S-02

Collin conseille de consulter son médecin pour un avis médical adapté à chaque patient.



Fabriqué par : Oscimed

Distribué par :

COLLIN

3, rue de Robinson
92227 Bagneux Cedex
Tél. : (+33) 01 49 08 08 88
Fax : (+33) 01 49 08 08 89
Mail : info@collinmedical.fr
Site : www.collinmedical.fr

SOMNOFIT®

Orthèse d'avancée mandibulaire





**Pour la prise en charge
du ronflement et
des syndromes d'apnée du
sommeil**

COLLIN
www.collinmedical.fr

Le principe de l'orthèse d'avancée mandibulaire consiste à propulser en avant la mandibule. Cette avancée dégage la base de langue et permet une ventilation adaptée. Les études cliniques démontrent l'efficacité de l'avancée sur le syndrome d'obstruction qui provoque ronflement et apnées durant la nuit.

SOMNOFIT® supprime ou réduit considérablement le ronflement et les apnées obstructives par traction de la langue. De plus, les bandelettes permettent de régler l'avancée avec une précision millimétrique, et ce, en fonction de l'anatomie du patient. La solution **SOMNOFIT®** est directement applicable du praticien ORL au patient.

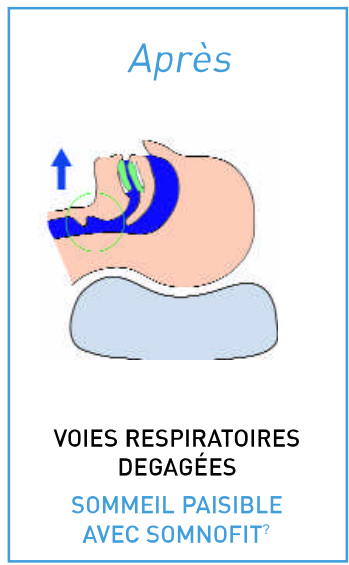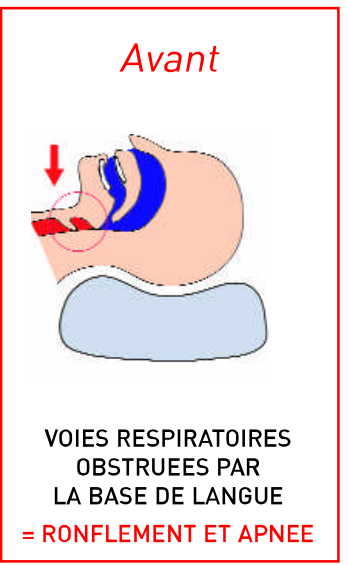

SOMNOFIT® se compose de deux gouttières buccales (inférieure et supérieure). La personnalisation de l'orthèse est réalisée par la prise de l'empreinte dentaire du patient, facile, grâce au matériau thermoformable. Il suffit de laisser les deux gouttières dans une eau chauffée à une température contrôlée par le thermomètre inclus dans le kit. (Cf. notice d'utilisation)

Une fois en place, les deux gouttières sont reliées par une bandelette qui génère l'avancée de la mandibule. Cette avancée, plus ou moins importante, sera fonction de la bandelette choisie. Cette opération n'est réalisée qu'une seule fois, chez le médecin. Il suffira ensuite de mettre **SOMNOFIT®** en bouche chaque soir avant de s'endormir pour une nuit reposante.

Réglage de l'avancée mandibulaire :



SOMNOFIT® est fourni avec un jeu de six bandelettes qui permettent de mesurer et contrôler l'avancée pour un résultat optimal. La taille des bandelettes varie de 3 à 10,5 mm.

Le choix de l'avancée se fera avec l'aide du médecin, qui trouvera le meilleur compromis entre efficacité et confort.



Système ARTOFLEX®

SOMNOFIT® est doté du système ARTOFLEX® breveté qui donne aux gouttières souplesse et confort en bouche. L'armature interne articulée et flexible est enrobée du matériau souple thermoformable. La tenue en bouche est ainsi optimale et confortable.

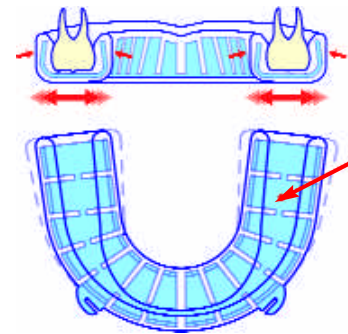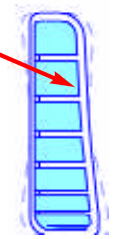

Articulations internes tri-directionnelles pour une tenue en bouche optimale et confortable. **SOMNOFIT** s'adapte à de multiples morphologies dentaires.

Les avantages de SOMNOFIT®

- ❖ Appareil professionnel à prix avantageux
- ❖ Entretien facile
- ❖ Adaptation à de multiples morphologies dentaires
- ❖ Répartition de la force d'avancée mandibulaire sur 20 à 24 dents
- ❖ Absence de tensions néfastes sur la dentition et les articulations
- ❖ Tenue parfaite et confortable en bouche
- ❖ Encombrement minimum
- ❖ Matériaux conformes aux normes médicales
- ❖ Avancée réglable entre 3 et 10,5 mm sur 6 positions