

Électrolarynx

fr

Caractéristiques

- 1) **Chapeau réglable** - Faire pivoter doucement pour régler et obtenir le meilleur ton de voix possible
- 2) **Bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)** - Bouton marche/arrêt pratique
- 3) **Molette de contrôle du volume** - À ajuster pendant la conversation pour augmenter (+) ou diminuer (-) le volume
- 4) **Molette de contrôle du ton** - Permet de régler facilement le ton pour qu'il soit aigu (+) ou grave (-)
- 5) **Pile de 9 V** - Comprise
- 6) **Adaptateur buccal Blom-Lauder** - À utiliser avec l'ElectroLarynx pour introduire le son directement au fond de la bouche lorsqu'il n'est pas efficacement transmis par le biais des tissus sur le côté de la gorge après une opération chirurgicale et/ou une radiothérapie

Mode d'emploi élémentaire

- 1) Dévissez le bouchon à l'extrémité de l'**électrolarynx Blom-Singer®** et insérez la **pile de 9 V**. Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT**. Vous devriez entendre la tonalité vocale électronique. Si ce n'est pas le cas, réinsérez la pile pour vous assurer qu'elle est correctement connectée.
- 2) Placez la membrane productrice de son située à l'extrémité de l'**électrolarynx Blom-Singer®** à plat contre le côté gauche ou droit de la gorge, juste en dessous de la mâchoire. Déplacez le point de contact jusqu'à ce qu'un « ah » le plus clair possible soit produit par votre bouche ouverte.
- 3) Ajustez la **molette de contrôle du ton** en fonction de vos besoins. Ajustez la **molette de contrôle du volume** au niveau souhaité.
- 4) Commencez par prononcer des mots simples et des phrases courtes. Parlez à une vitesse normale, mais exagérez légèrement les mouvements de votre bouche pour que les mots soient le plus clair possible. **Il est recommandé de consulter un orthophoniste pour obtenir des instructions supplémentaires sur l'utilisation de l'électrolarynx Blom-Singer®.**

Réglage du volume :

Le volume peut être ajusté en tournant la molette de contrôle du volume (+) ou (-) jusqu'à ce que le niveau souhaité soit atteint.



Volume (+) ou (-)

Réglage du ton :

Le son peut être ajusté en tournant la molette de contrôle du ton (+) ou (-) jusqu'à ce que le niveau souhaité soit atteint.



Ton (+) ou (-)

Caractéristiques techniques

Dimensions	L 129 mm x Ø 36 mm L 5 po x Ø 1,42 po
Poids	85 g (0,19 lb) sans la pile
Valeurs électriques	40 Hz à 170 Hz
Alimentation	Pile de 9 V

Pièces de rechange

Élément	Référence
Cordon (1)	EL1001
Adaptateur buccal Blom-Lauder (1)	EL1002
Couvercle du compartiment de la pile (1)	EL1004
Bouchon de la tête ajustable (1)	EL1007

Garantie

- Le dispositif Blom-Singer ElectroLarynx, ou les dispositifs de remplacement, est/sont garanti(s) 3 ans à compter de la date de premier achat.
- Si les dispositifs sont renvoyés alors qu'ils sont sous garantie, ils seront réparés ou remplacés gratuitement par des dispositifs neufs, en cas de défaut de fabrication uniquement.
- Cette garantie est nulle si le numéro de série appliqué en usine a été altéré ou effacé du dispositif.
- Cette garantie ne couvre pas les dommages esthétiques, les dommages causés par les catastrophes naturelles, les accidents, la mauvaise utilisation, l'abus, la négligence, l'utilisation par plusieurs patients, la chute du dispositif, l'exposition du dispositif à la chaleur, l'eau ou l'humidité, tout réparation ou modification du dispositif, et les dispositifs perdus ou endommagés lors de l'envoi.
- Cette garantie s'applique uniquement à l'utilisateur individuel original et n'est pas valable si plusieurs patients utilisent le dispositif.
- La présente garantie ne couvre pas les piles et/ou les chargeurs de piles.
- Pour bénéficier du service compris dans la garantie, vous devez contacter InHealth Technologies, indiquer le numéro de série et recevoir une autorisation de retour. Le dispositif doit être retourné dans son emballage d'origine ou dans un emballage offrant le même degré de protection à InHealth Technologies.

