

Otovent®

La méthode Otovent®
Rééducation tubaire par auto-insufflation



Avant :

- ▶ **Dysfonctionnement tubaire**
- ▶ **Pression négative**
- ▶ **Douleurs**
- ▶ **Otites**

Facile d'emploi, la méthode Otovent® restaure la fonction tubaire par une pression physiologique contrôlée. Elle trouve son intérêt en période d'attente ou d'alternative de pose d'aérateur transtympanique ou en complément de la rééducation tubaire.

Après :

- ▶ **Pression équilibrée**
- ▶ **Soulagement de la douleur**
- ▶ **Acuité auditive rétablie**
- ▶ **Pronostic amélioré**
- ▶ **Aide à la décision de pose d'aérateur transtympanique**

Les travaux scientifiques européens* démontrent que la méthode Otovent® est une technique non invasive rétablissant une pression équilibrée dans plus de 50% des cas de symptomatologie de pression négative.

* Strangerup et al. ...

Pour une information plus complète, contactez :

 **COLLIN**
www.collinmedical.fr

3, rue de Robinson - CS 20016
92227 Bagneux Cedex
Tél. : +33 1 49 08 08 88
Fax : +33 1 49 08 08 89
info@collinmedical.fr

La méthode Otovent®

Pour le traitement physiologique de la pression négative de l'oreille moyenne

Référence code CIP : 701 067-4

► **Forme et présentation :**

Référence Collin 90310 :

- 10 ballonnets précalibrés médicaux
- 1 embout nasal (polypropylène)
- Mode d'emploi

Référence Collin 90305 :

- 5 ballonnets précalibrés médicaux
- 1 embout nasal (polypropylène)
- Mode d'emploi

► **Indications :**

Traitement de la pression négative de l'oreille moyenne, notamment :

- Otite séreuse
- Changement de pression barométrique (avion, montagne, etc.)
- Chez l'adulte, toute pathologie du confinement de l'oreille moyenne requérant une désobstruction mécanique, physiologique

► **Contre-indications :**

- Rhume ou toute autre obstruction nasale qui empêche de pratiquer une auto-insufflation
- Otite moyenne aiguë

► **Effets indésirables :**

Aucun connu à ce jour si la méthode est utilisée selon le mode d'emploi.

► **Mise en garde :**

La méthode Otovent® doit toujours être utilisée sous le contrôle d'un adulte. Ne pas laisser à la portée des enfants.

► **Mode d'emploi :**

Usuellement, utiliser la méthode Otovent® au minimum 2 fois par jour, matin et soir, de préférence 3 fois matin, midi et soir.

La durée normale d'utilisation de la méthode est d'au moins 3 semaines.

Chaque ballonnet pré-testé et calibré peut être utilisé 3 à 4 jours maximum (moins de 10 fois chacun). Laver l'embout à l'eau savonneuse, rincer.

Jeter les ballonnets usagés.

Enfants de moins de 3 ans : les parents doivent gonfler le ballonnet puis l'appliquer sur chaque narine de l'enfant, en fermant l'autre narine et en demandant à l'enfant d'avaler.



Non pris en charge par la Sécurité Sociale

Cachet du médecin